


- Tarkasta että tuotteet hyvässä kunnossa saapuessaan. Ramppien tulee liikkua helposti.
- Lue ohjeet ja varoitukset huolellisesti, ennen kuin alat käyttämään rampeja. Tallenna ohjeet tulevaisuutta varten.

- Jokaisessa rampissa on merkintä maksimikuormasta. **Merkintä tarkoittaa yhtä ramppia.** Kaksi ramppia kantaa yhteenlasketun painon, kun paino jakautuu tasaisesti. **Maksimi kuorma on ilmoitettu tällä merkinnällä**

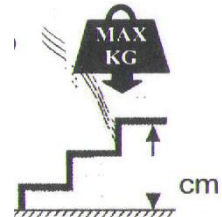

- **Merkintä kertoo myös suositellun korkeuseron, jolle tämä ramppi on sopiva.**

Käytä ramppia hyvän harkinnan mukaan.

Käyttö

- Aseta ramppi kyljelleen kahvat ylöspäin. Avaa taitettu ramppi kokonaan auki.
V30 malli - Avaa teleskooppiosan kuljetuslukko ja avaa teleskooppinen ramppi haluamallasi pituudelle.
Aseta rampin yläpään taitettu osa hyvin ylätasolle. Rampin yläpäässä on luistamatonta kumimattoa yläpään parempaa kiinnitystä varten. Varmista käytön yhteydessä, että pyörätuolin osat eivät tartu ramppiin ja työnnä ramppia pois ylätasolta. Ramppien etäisyyden toisistaan tulee olla säädetty niin, että käytettävän pyörätuolin pyörät kulkevat keskellä ramppien kouruja.
- Kuljetettaessa, kasaa rammit huolella ja kiinnitä lukot. Kanna ramppia kantokahvasta
- Rampin rikkoontuessa millään tavalla, sitä ei tule käyttää ennen korjausta. Ota yhteyttä tuotteen myyjään/maahantuojaan lisätietoja varten.

Takuu

- Tuotteella on kahden vuoden takuu. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty ohjeiden vastaisesti.

Huolto

- Rammit tulee pitää puhtaana liasta ja lumesta, yläpään kantavan osan alla oleva kumi on oltava käytettäessä puhdas. Rammit voidaan puhdistaa normaaleilla puhdistusaineilla. Painepesurin käyttö on sallittua.

Kierrätys

- Kaikki käytetty materiaali on kierrätettävissä. Kierrätettäessä materiaalia, poista muoviosat ja erottele alumiinit ja muovi toisistaan.

Maahantuonti:
Suomen Apu-Tuote Oy
www.aputuote.fi
puh. 010 423 4210

Valmistus:
Kvistberga Group AB, Ruotsi
www.kvistberga.se
puh +46 2166 100